

Teil 4: Nutzerführung für die Accu-Chek Insight (V. 3) bei Verwendung des Benutzerprofils „Akustisch“

Entfernen der Batterie im Run Modus (Schritt 1 bis 5)

- 1 das Infusionsset abkoppeln, um eine versehentliche Insulinabgabe zu vermeiden.
- 2 Drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn bis zur ersten Stopposition (90°).
- 3 Schieben Sie die geriffelte Entriegelung Richtung Ampullen-Fach.
- 4 Mit der aufstellbaren Greifhilfe lässt sich der Batteriefachdeckel unter leichten hin und her drehen hochziehen (kein Gewinde, der Dichtgummi saugt sich manchmal fest).
- 5 Entnehmen Sie die alte Batterie.

Einlegen der Batterie (Schritt 6 bis 8)

- 6 Legen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol (+) zuerst in das Batteriefach ein.
- 7 Bringen Sie den Batteriefachdeckel über der Batterie an.
- 8 Drücken Sie den Batteriefachdeckel vollständig in das Batteriefach hinein, bis er hörbar einrastet und drehen Sie den Adapter im Uhrzeigersinn in die geschlossenen Position.

Sobald die Batterie eingelegt ist, beginnt der Startvorgang mit dem Selbsttest. Wenn nicht, überprüfen Sie bitte, ob die Batterie mit dem Pluspol voran eingelegt wurde. Ist die Batterie mit dem Minuspol voran eingelegt, gibt die Pumpe weiterhin im Abstand von 8 Sekunden einen Signalton aus (15 Minuten Pause-Modus).

Der zuletzt verwendete Batterietyp ist vorgewählt, Auslieferungszustand ist Lithium, darunter steht Alkaline. Drückt man von Alkaline aus auf Ab, ertönt das Endsignal.

- 9 Drücken Sie Auf oder Ab, um zum eingelegten Batterietyp zu gelangen. Drücken Sie OK.
Die Anzeige „Insulinabgabe starten?“ erscheint. Drücken Sie OK.

Einlegen der Batterie im Stopp Modus

Beim Entfernen der Batterie im Run Modus, geht die Insight für 15 Minuten in den Pause Modus. Ist sie dann beim Einlegen der Batterie wegen Zeitüberschreitung in den Stopp Modus gewechselt, geschieht folgendes:

Die Anzeige „Warnung M28: Zeitüberschreitung bei Pause. Pumpe gestoppt“ erscheint. Den Alarm mit Ok stummschalten.

Die Anzeige „Wartung M28: Pumpenstatus überprüfen“ erscheint. Mit Ok bestätigen.

Die Anzeige „Wartung M29: Batterietyp nicht eingestellt“ erscheint. Den Alarm mit Ok stummschalten.

Die Anzeige „Wartung M29: Batterietyp nicht eingestellt. Batterietyp einstellen“ erscheint. Mit Ok bestätigen.

Jetzt wieder wie unter Schritt 9 verfahren.

Entwarnung

Der Start aus dem Stopp Modus wird mit nervigen Alarmtönen und Vibrationen begleitet. Keine Angst, es kann nichts schief gehen. Die Pumpe ist vom Körper getrennt, die Batterie ist eingelegt und alles was man machen muss, ist 6-mal mit Ok bestätigen.

Den Ablauf kann man in Ruhe nachverfolgen unter:

5.1 Ereignisdaten

Aus der Standardanzeige, mit Ok ins Haupt-Menü auf Bolus, mit 4-mal Ab auf Pumpendaten, mit Ok auf Ereignisdaten, mit OK auswählen

Typ und Nummer der Wartungs-, Warn- oder Fehlermeldung (z. B. Warnung W32 Batterie fast leer)

Die dazu gehörige Uhrzeit und Datum sind optisch vorhanden, werden aber nicht ausgegeben. Mit den Ab- und Auf-Tasten wandern Sie durch die Liste.